



**CHRISTIE**  
INNOMED

Imaginez  
**Davantage.**

Synapse Mobility

Guide de démarrage rapide

1. Ouvrez votre navigateur (Chrome ou Internet Explorer) et tapez l'adresse \*\*\*Insérer l'adresse du site\*\*\*

2. Le navigateur affiche la page de connexion :




3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

4. À la page d'invite, sélectionnez le client « HTML Client » :



5. À la page de recherche, entrez les informations patient désirés pour le recherche et appuyer sur le bouton « Rechercher »

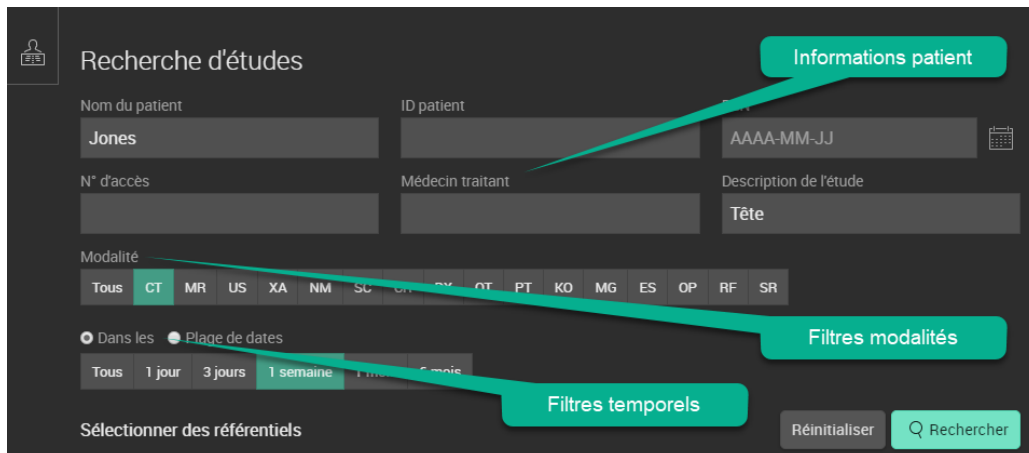

Vous pouvez également combiner des filtres de modalités et temporels aux informations patient pour restreindre la liste de résultats.

6. Une liste d'études correspondantes à la recherche s'affiche :

Il est possible de trier les résultats de recherche par Nom, ID, Date de l'étude et Modalité.

7. Double-cliquez sur n'importe quelle étude de la liste pour l'ouvrir :