



IMAGERIE MÉDICALE | INFORMATIQUE MÉDICALE | SOLUTIONS TI EN SANTÉ

Christie Innomed Inc.


Synapse 5

Guide de référence rapide

Synapse – Guide de référence rapide



- 1- Ouvrez Synapse en double-cliquant sur l'icône Synapse du bureau
- 2- Saisissez le Nom d'utilisateur et le mot de passe indiqué sur la station de visualisation.
- 3- L'écran principal de Synapse est divisé en 2 sections : la section de gauche détaille les listes de travail et l'écran de droite permet de saisir les critères pour initier une recherche.
- 4- L'utilisation de la liste **Tous les examens avec images** est recommandée puisqu'elle vous permet d'accéder à tous les examens archivés.

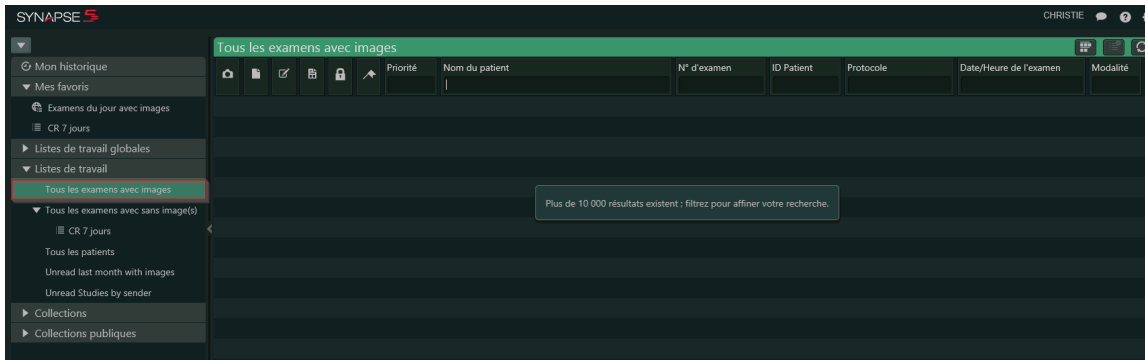


- 5- Saisir un ou plusieurs critères afin de cibler l'examen à consulter. Exemple de critères :
 - Nom du patient [Nom(s) Prénom(s) propriétaire(s), Nom de l'animal]
 - ID Patient
 - Date/Heure de l'examen
 - Modalité (CR, CT, MR, US, RF, NM...)


Pour effectuer une recherche utilisant le nom de l'animal comme critère, précédez le texte d'une virgule.

Priorité	Nom du patient	N° d'examen	ID Patient	Protocole	Date/Heure de l'examen
R	Grondin Juliane, Rosy	1244802	92793	PA-POUMONS	12/12/2019 3:51:29 PM
R	Messier Guylaine, Rosen Bradilla	1244690	72653	GA-POUMONS	12/12/2019 11:40:56 AM

- 6- Pour visualiser les images, double-cliquez sur la ligne de l'examen ou faites un clic droit. Vous accéderez à un menu vous permettant de visualiser les images, le rapport ou le sélecteur de séries.

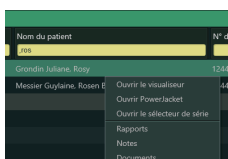


Fonctions du Visualiseur :

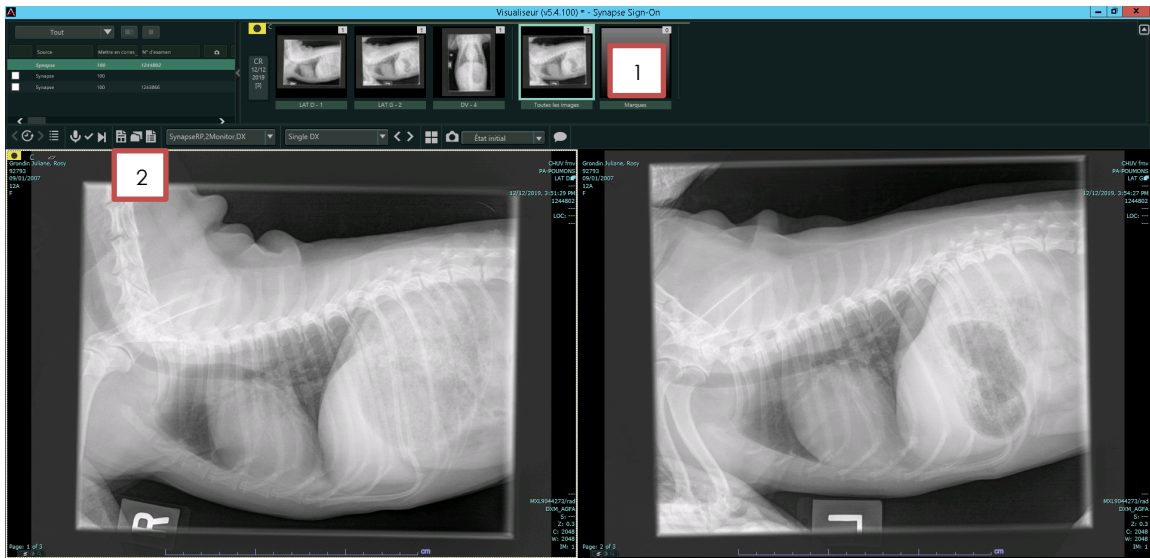

- 1- Les séries de l'examen ainsi que l'historique du sujet sont affichés dans le Sélecteur de séries situé dans la section supérieure de la fenêtre (1).
- 2- Pour faire défiler les images, utilisez la molette de la souris ou les clés suivante/précédente du clavier.
- 3- Pour naviguer entre les séries, utilisez les boutons **<>** de la barre d'outils Synapse ou cliquez-glissez les séries à partir du Sélecteur de séries
- 4- Les icônes de la barre d'outils Synapse permettent la visualisation du rapport.



- 5- Un clic droit sur une image affichera un menu contextuel qui permet l'accès à plusieurs outils dont les fonctions de Zoom et de mesures.

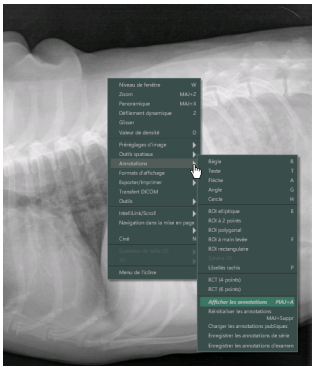

- 6- Pour fermer le Visualiseur, cliquez sur le « X » situé au coin supérieur droit de l'écran. L'écran principal de Synapse sera de nouveau affiché.